


TD GLUCO

 **Bluetooth®**

BLUTZUCKERMESSSYSTEM

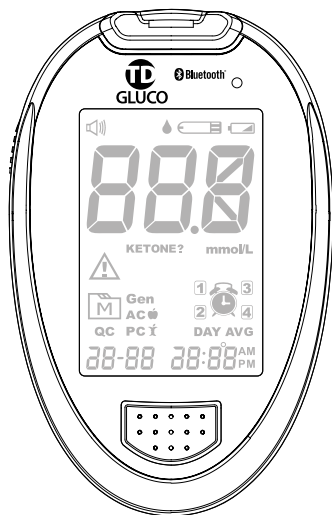

Handbuch

Htone

TD-4277B version 2.0 2016/03
HT102015B-01G
311-4277200-002



TD-GLUCO Bluetooth® (TD-4277B)

Vielen Dank, dass Sie sich für das Blutzuckermesssystem TD-GLUCO Bluetooth. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur korrekten Verwendung des Messgeräts. Bitte lesen Sie sich diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Eine regelmäßige Überwachung Ihres Blutzuckerspiegels kann Ihnen und Ihrem Arzt helfen, Ihren Diabetes besser zu kontrollieren. Dank seiner kompakten Größe und einfachen Bedienung können Sie das Blutzuckermesssystem TD-GLUCO Bluetooth verwenden, um Ihre Werte jederzeit einfach selbst zu messen.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Gebrauchsanleitung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten.

Vorgesehene Verwendung

Dieses System ist für den Gebrauch außerhalb des Körpers (In-vitro-Diagnostik), zu Hause durch Personen mit Diabetes und in klinischen Einrichtungen durch medizinisches Fachpersonal als Hilfsmittel zur Überwachung der Wirksamkeit der Diabetesregelung vorgesehen. Es dient zur quantitativen Messung von Glukose (Zucker) in frischen Vollblutproben (aus Finger, Handfläche, Unterarm und Oberarm).

Das System darf nicht zur Diagnose oder zum Screening von Diabetes oder zum Testen von Neugeborenen verwendet werden.

Angehörige von Gesundheitsberufen dürfen das Messgerät zum Testen mit kapillaren und venösen Blutproben verwenden. Im Hausgebrauch darf nur Kapillarvollblut getestet werden.



WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – BITTE VOR GEBRAUCH DES GERÄTS LESEN!


1. Verwenden Sie das Messgerät **NUR** für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.
2. Verwenden Sie **KEIN** Zubehör, das nicht vom Hersteller spezifiziert worden ist.
3. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn es nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist.
4. Verwenden Sie das Gerät **NIE** bei Neugeborenen oder Kleinkindern.
5. Dieses Gerät ist **NICHT** zur Behandlung von Symptomen oder Krankheiten bestimmt. Die gemessenen Daten dienen nur als Referenz. Wenden Sie sich zur Interpretation der Ergebnisse immer an Ihren Arzt.
6. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und üben Sie mehrmals, bevor Sie mit dem Testen Ihres Blutzuckers und/oder Ihrer Ketone beginnen. Führen Sie alle Qualitätsprüfungen gemäß den Anweisungen durch.
7. Bewahren Sie das Messgerät und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Kleinteile wie Batterieabdeckung, Batterien, Teststreifen, Lanzetten und Verpackungskapen stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr dar.
8. Die Verwendung dieses Messgeräts in trockener Umgebung kann, insbesondere wenn synthetische Materialien (synthetische Kleidung, Teppichboden usw.) vorhanden sind, eine statische Entladung auslösen, die zu fehlerhaften Messergebnissen führen kann.
9. Verwenden Sie dieses Messgerät **NICHT** in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung, da dies die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen kann.
10. Eine ordnungsgemäße Wartung ist für die Lebensdauer Ihres Messgeräts unerlässlich. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit Ihrer Messungen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AN EINEM SICHEREN ORT AUF!

INHOUD

| | |
|---|-----------|
| BEVOR SIE BEGINNEN | 07 |
| Wichtige Informationen | 07 |
| Übersicht des Messgeräts | 08 |
| Display | 09 |
| Teststreifen | 09 |
| EINSTELLEN DES MESSGERÄTS | 10 |
| DIE VIER MESSMODI | 11 |
| QUALITÄTSKONTROLLTEST | 12 |
| Test mit der Kontrolllösung | 12 |
| Durchführen eines Tests mit der Kontrolllösung | 12 |
| TESTS MIT BLUTPROBEN | 14 |
| Vorbereitung des Stechgeräts für einen Bluttest | 14 |
| Vorbereitung der Einstichstelle | 14 |
| Durchführung eines Blutzuckertests | 15 |
| SPEICHER DES MESSGERÄTS | 17 |
| Testergebnisse anzeigen lassen | 17 |
| Anzeigen der durchschnittlichen Blutzuckerwerte über mehrere Tage | 17 |
| MIT EINEM SMARTPHONE VERBINDEN | 18 |
| WARTUNG | 20 |
| Batterie | 20 |
| Pflege Ihres Messgeräts | 21 |
| Pflege Ihrer Teststreifen | 21 |
| Wichtige Informationen über die Kontrolllösung | 22 |
| PROBLEME MIT DEM SYSTEM LÖSEN | 23 |
| Ablesen der Messergebnisse | 23 |
| Fehlermeldungen | 23 |
| Probleme lösen | 24 |
| DETAILLIERTE INFORMATIONEN | 25 |
| INFORMATIONEN ZU DEN SYMBOLEN | 25 |
| SPEZIFIKATIONEN | 26 |

BEVOR SIE BEGINNEN

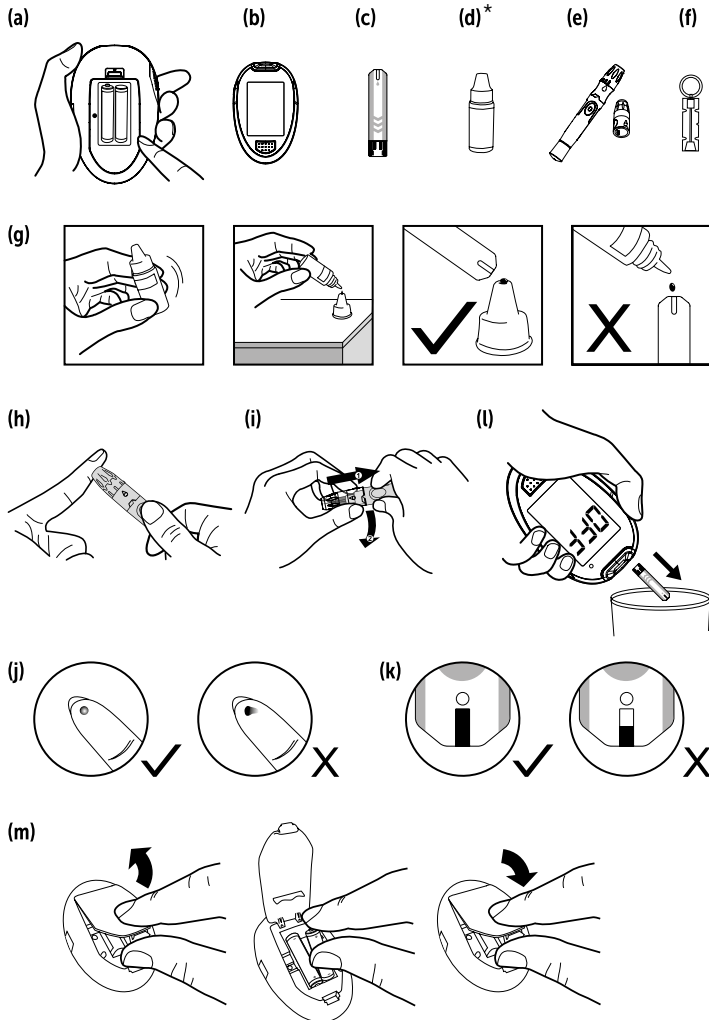


Wichtige Informationen

- Eine starke Dehydratation und ein übermäßiger Flüssigkeitsverlust können dazu führen, dass Messwerte angezeigt werden, die unter den tatsächlichen Werten liegen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie unter starker Dehydratation leiden, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Wenn Ihr Blutzuckerspiegel niedriger oder höher ist, als er normalerweise zu sein pflegt und Sie keine Krankheitssymptome haben, wiederholen Sie den Test. Wenn Sie Symptome haben oder weiterhin niedrigere oder höhere Ergebnisse als normal erzielen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und befolgen Sie die Behandlungsempfehlungen.
- Verwenden Sie zum Testen Ihres Blutzuckers nur frische Vollblutproben. Die Verwendung anderer Substanzen führt zu falschen Ergebnissen.
- Wenn Sie Symptome haben, die nicht mit den Ergebnissen Ihrer Testergebnisse übereinstimmen, und Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Wir raten von der Verwendung dieses Messgeräts bei Personen mit sehr niedrigem Blutdruck oder bei Patienten, die unter Schock stehen, ab. Wenden Sie sich vor dem Gebrauch immer an Ihren Arzt.

* Die Kontrolllösung ist nicht im Starterpaket enthalten.

Übersicht des Messgeräts

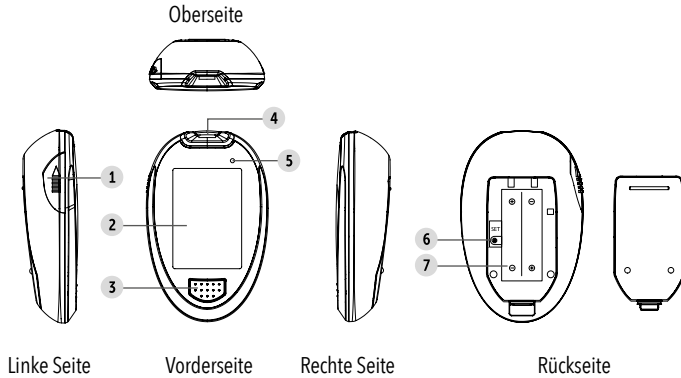

1 Auswurf des Teststreifens

Wirft den verbrauchten Streifen durch Drücken dieser Taste nach oben aus.

2 Display

3 Haupttaste (M)

Öffnet den Speicher des Messgeräts und schaltet den Erinnerungsalarm ein oder aus.

4 Teststreifeneinschub mit Streifenkontrollleuchte

Führen Sie den Teststreifen ein, um das Messgerät für einen Test einzuschalten.

5 Bluetooth-Anzeige

6 SET-Taste (S)

Damit werden die gewünschten Parameter des Messgeräts eingegeben und bestätigt.

7 Batteriefach

Display

1 Testergebnis

2 Ketonenwarnung

3 Fehlerwarnung

4 Speichersymbol

5 Kontrolllösungsmodus

QC (Qualitätskontrolle)

Kontrolllösungstests

6 Messmodus

AC - vor der Mahlzeit

PC - nach der Mahlzeit

Gen - an einem beliebigen Zeitpunkt des Tages

7 Datum

8 Uhrzeit

9 Durchschnitt über mehrere Tage


10 Alarmsymbol

11 Messeinheit


12 Symbol für schwache Batterie

13 Teststreifensymbol

14 Blutropfensymbol

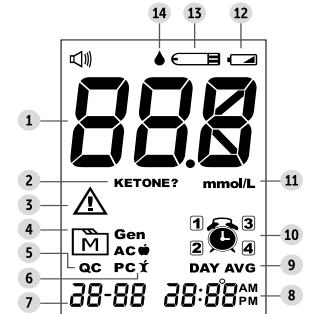

Teststrip

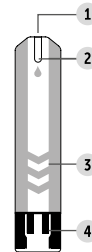

1 Absorbierende Öffnung

2 Kontrollfenster

3 Anfassstelle

4 Kontaktpunkte

VORSICHT:

Die Vorderseite des Teststreifens muss nach oben zeigen, wenn Sie den Teststreifen einlegen. Die Testergebnisse können falsch sein, wenn der Teil des Teststreifens mit den Kontakten nicht vollständig in den Testschlitz eingeführt wird.

BEMERKUNG:

Das TD-GLUCO Bluetooth-Messgerät darf nur mit TD-GLUCO TD-4360 Teststreifen verwendet werden. Die Verwendung anderer Teststreifen mit diesem Messgerät kann zu ungenauen Ergebnissen führen.

DAS MESSGERÄT EINSTELLEN

Bevor Sie Ihr Messgerät zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie die Batterie austauschen, müssen Sie die folgenden Einstellungen kontrollieren und aktualisieren:

Öffnen Sie den Einstellmodus (a)

Beginnen Sie mit dem ausgeschalteten Messgerät (keinen Teststreifen einsetzen). Drücken Sie auf die **S**-Taste neben den Batterien.

1. Das Datum einstellen

Die Reihenfolge der Datumseinstellung ist: JAHR → MONAT → TAG, wobei JAHR / MONAT / TAG nacheinander blinken. Drücken Sie auf **M**, um die richtige Einstellung auszuwählen. Drücken Sie dann auf **S**.

2. Zeitanzeigemodus einstellen

Drücken Sie auf die Haupttaste **M** an der Vorderseite des Messgeräts, um den Zeitmodus auszuwählen (12- oder 24-Stunden-Anzeige). Drücken Sie danach auf **S**.


3. Uhrzeit einstellen

Während STUNDE / MINUTE nacheinander blinken, drücken Sie auf die **M**-Taste, bis die korrekte Zeit erscheint. Drücken Sie danach auf **S**.

4. Ton ein- und ausschalten

In der Toneinstellung auf dem Display drücken Sie auf die **M**-Taste, um zwischen „ein“ und „aus“ zu wechseln. Drücken Sie danach auf **S**.

5. Erinnerungsalarm einstellen

An Ihrem Messgerät können Sie vier Zeiten für den Erinnerungsalarm einstellen. Das Messgerät zeigt „ein“ oder „aus“ und „“ an. Wenn Sie keinen Erinnerungsalarm einstellen möchten, drücken Sie auf **S**, um diesen Schritt zu überspringen. Oder drücken Sie auf **M**, um „ein“ auszuwählen und drücken Sie dann auf **S**.

Während STUNDE / MINUTE nacheinander blinken, drücken Sie auf die **M**-Taste, um die richtige Uhrzeit auszuwählen. Drücken Sie danach auf **S** und gehen Sie dann zur folgenden Alarmzeit.

ACHTUNG:

Wenn der Alarm auslöst, drücken Sie auf **M**, um diesen zu bestätigen; halten Sie **M** gedrückt, um den Alarm auszuschalten; oder der Alarm ertönt für 2 Minuten und schaltet sich dann automatisch ab.


Herzlichen Glückwunsch! Sie haben alle Einstellungen vorgenommen!

BEMERKUNG::

- Diese Parameter können **NUR** im Einstellmodus geändert werden.
- Wenn das Messgerät im Einstellmodus 5 Minuten lang nicht verwendet wird, wird es automatisch ausgeschaltet.

DIE VIER MESSMODI

Das Messgerät bietet Ihnen vier Messmöglichkeiten: Allgemein, AC (vor der Mahlzeit), PC (nach der Mahlzeit) und QC (Qualitätskontrolle). Sie können zwischen den einzelnen Modi wie folgt wechseln:

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Messgerät. Legen Sie einen Teststreifen ein, um das Messgerät einzuschalten. Auf dem Bildschirm sehen Sie ein blinkendes  und „Gen“.
2. Drücken Sie **M**, um zwischen den Modi Allgemein, AC, PC und QC zu wechseln.

QUALITÄTSKONTROLLTEST

Dieser Kontrolllösungstest ist bei der Ingebrauchnahme des TD-GLUCO Bluetooth Blutzuckermesssystem nicht erforderlich.

Test mit der Kontrolllösung.

Wann muss ein Test mit der Kontrolllösung durchgeführt werden?

- Wenn Sie glauben, dass das Messgerät oder die Teststreifen nicht richtig funktionieren.
- Wenn die Ergebnisse Ihres Tests nicht mit Ihrem Gefühl übereinstimmen oder wenn Sie den Verdacht haben, dass die Ergebnisse ungenau sind.
- Zum Üben des Testverfahrens.
- Wenn Sie das Messgerät fallen gelassen haben oder glauben, dass es beschädigt sein könnte.

Teststreifen (c), Kontrolllösung (d), Stechhilfe (e) oder sterile Lanzetten (f) sind möglicherweise nicht im Kit enthalten (bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Ihrer Produktverpackung). Diese Artikel können separat bestellt werden.

Einen Test mit der Kontrolllösung durchführen.

Zur Durchführung des Tests mit der Kontrolllösung benötigen Sie die Komponenten (b), (c) und (d).

1. Setzen Sie den Teststreifen ein, um das Messgerät einzuschalten.

Warten Sie, bis das Messgerät "☐" und ein blinkendes "▲" -Symbol anzeigt.

2. Tragen Sie die Kontrolllösung auf (g)

Schütteln Sie die Kontrolllösungsflasche vor Gebrauch gut. Drücken Sie den ersten Tropfen heraus und wischen Sie ihn weg. Drücken Sie einen weiteren Tropfen aus der Flasche und setzen Sie ihn auf die Spitze des Flaschenverschlusses. Halten Sie das Messgerät so, dass die absorbierende Öffnung des Teststreifens den Tropfen berührt und die Kontrolllösung absorbiert. Sobald das Kontrollfenster des Teststreifens vollständig ausgefüllt ist, beginnt das Messgerät automatisch mit dem Countdown.

WARNUNG:

Wenn Sie den Test mit der Kontrolllösung durchführen, müssen Sie ihn markieren, damit das Testergebnis **NICHT** mit den Blutzucker-**TESTERGEBNISSEN** im Speicher verwechselt wird. Andernfalls werden die Blutzuckertestergebnisse mit den Testergebnissen der Kontrolllösung im Speicher verwechselt.

3. Lesen Sie das Ergebnis ab und vergleichen Sie es

Nach dem Countdown bis **0** wird das Testergebnis der Kontrolllösung auf dem Display angezeigt. Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit dem auf der Verpackung des Teststreifens angegebenen Bereich. Das Ergebnis muss innerhalb dieser Werte liegen. Wenn nicht, lesen Sie sich die Anweisungen erneut durch und wiederholen Sie den Kontrolllösungstest.

BEMERKUNG:

- Der auf dem Teststreifenröhrchen angegebene Kontrolllösungsbereich darf nur für die Kontrolllösung verwendet werden. Dies ist kein empfohlener Bereich für Ihren Blutzuckerspiegel.
- Siehe den Abschnitt **WARTUNG** für wichtige Informationen über Ihre Kontrolllösung.

TESTS MIT BLUTPROBEN

WARNUNG:

Um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu begrenzen:

- Teilen Sie niemals eine Lanzette oder ein Stechgerät mit anderen.
- Verwenden Sie immer eine neue sterile Lanzette. Lanzetten sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie keine Handlotion, kein Öl und keine Schmutzrückstände in oder auf die Lanzetten und das Stechgerät gelangen.

Vorbereitung des Stechgeräts für einen Bluttest

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Packungsbeilage des Stechgeräts, um eine Blutprobe zu entnehmen.

Vorbereitung der Einstichstelle

Die Stimulierung der Blutperfusion durch das Reiben der Einstichstelle vor der Blutentnahme hat einen großen Einfluss auf den erhaltenen Testwert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie einen Blutstropfen nehmen:

- Waschen Sie sich Ihre Hände und trocknen Sie sie ab, bevor Sie beginnen.
- Wählen Sie die Einstichstelle aus.
- Reiben Sie die Einstichstelle vor dem Einstechen etwa 20 Sekunden lang.
- Reinigen Sie die Einstichstelle mit einem mit einer 70%-igen Alkohollösung angefeuchteten Wattestäbchen und lassen Sie die Haut an der Luft trocknen.
- Tests an der Fingerspitze (h)
Drücken Sie die Spitze des Stechgeräts fest gegen die Unterseite Ihrer Fingerspitze.
Drücken Sie die Entriegelungstaste, um Ihren Finger einzustechen. Ein Klick zeigt an, dass der Einstich stattgefunden hat.



BEMERKUNG:

- Wählen Sie bei jedem Einstechen eine andere Stelle. Ein wiederholtes Stechen an derselben Stelle kann zu Wunden Stellen und Hornhaut führen.
- Es wird empfohlen, den ersten Blutstropfen abzuwischen, da dieser möglicherweise Gewebeflüssigkeit enthält, die das Testergebnis beeinflussen kann.

Durchführung eines Blutzuckertests

Um einen Blutzuckertest durchzuführen, benötigen Sie die folgenden Komponenten: (b), (c),(e) und (f)

1. Führen Sie einen Teststreifen in den Testschlitz des Messgeräts ein, um das Messgerät einzuschalten

Warten Sie, bis das Messgerät die Symbole "" und "" anzeigt.

2. Wählen Sie den gewünschten Messmodus indem Sie **M** drücken.

3. Eine Blutprobe entnehmen (j)

Verwenden Sie das zuvor eingestellte Stechgerät, um die gewünschte Stelle einzustechen. Den ersten Blutstropfen mit einem sauberen Wattestäbchen abwischen. Die Größe des Tropfens sollte mindestens so groß sein wie (tatsächliche Größe), was einem Volumen von ungefähr **0,5** Mikrolitern (μl) entspricht. Kneifen Sie den Bereich um die Einstichstelle vorsichtig zusammen, um einen weiteren Blutstropfen zu erhalten. Achten Sie darauf, die Blutprobe **NICHT** zu verschmieren.

4. Tragen Sie die Probe auf (k)

Bringen Sie den Blutstropfen vorsichtig in einem schrägen Winkel mit dem Teststreifen in Kontakt. Das Kontrollfenster des Teststreifens wird vollständig gefüllt, wenn genügend Blut aufgetragen wurde. Entfernen Sie Ihren Finger **NICHT**, bevor Sie einen Piepton hören.

BEMERKUNG:

- Drücken Sie die Einstichstelle nicht gegen den Teststreifen und versuchen Sie nicht, das Blut zu verschmieren.
- Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten keine Blutprobe auf den Teststreifen auftragen, schaltet sich das Messgerät automatisch aus. In diesem Fall müssen Sie den Teststreifen entfernen und erneut einlegen, um einen neuen Test zu starten.
- Das Kontrollfenster muss mit Blut gefüllt sein, bevor das Messgerät automatisch herunterzählt. Versuchen Sie **NIEMALS**, mehr Blut in den Teststreifen zu geben, nachdem der Blutstropfen absorbiert wurde. **In diesem Fall werfen Sie den Teststreifen weg und führen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen erneut durch.**
- Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Füllen des Kontrollfensters haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an den Kundendienst.

5. Lesen Sie das Ergebnis ab

Das Ergebnis Ihres Tests wird angezeigt, nachdem das Messgerät auf 0 heruntergezählt hat. Der Wert wird automatisch im Speicher Ihres Messgeräts gespeichert.

6. Werfen Sie den benutzten Teststreifen aus (I)

Werfen Sie den Teststreifen aus, indem Sie die Auswurfaste an der Seite drücken. Verwenden Sie einen speziellen Abfallbehälter, um gebrauchte Teststreifen zu entsorgen. Das Messgerät schaltet sich automatisch aus.

Befolgen Sie immer die Anweisungen auf der Packungsbeilage der Stechhilfe, wenn Sie die gebrauchte Lanzette entfernen.

BEMERKUNG:

Der verwendete Teststreifen und die verwendete Lanzette können eine biologische Gefahr darstellen. Entsorgen Sie sie ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften.

SPEICHER DES MESSGERÄTS

Das Messgerät speichert die letzten **1.000** Testergebnisse zusammen mit den entsprechenden Daten und Zeiten im Speicher. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Messgerät, um auf den Speicher des Messgeräts zuzugreifen.

Testergebnisse anzeigen lassens

1. Drücken Sie auf **M** und lassen Sie die Taste los.

Das Symbol "**M**" erscheint auf dem Display. Drücken Sie erneut **M**, der erste Messwert, den Sie sehen, ist das neueste Testergebnis mit Datum, Uhrzeit und Messmodus.

2. Drücken Sie auf **M**, um die im Messgerät gespeicherten Testergebnisse abzurufen. **Wenn Sie M nach dem letzten Ergebnis gedrückt halten, schaltet sich das Messgerät aus.**

Anzeigen des durchschnittlichen Blutzuckerwertes über mehrere Tage

1. Drücken Sie auf **M** und lassen Sie die Taste los. Wenn "**M**" auf dem Display erscheint, halten Sie **M** 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige „**DAY AVG**“ (Durchschnitt über mehrere Tage) blinkend erscheint. Lassen Sie **M** los und Ihre 7-Tage-Durchschnittsergebnisse, die im allgemeinen Modus gemessen worden sind, werden auf dem Display angezeigt.

2. Drücken Sie auf **M**, um die 14-, 21-, 28-, 60- und 90-Tage-Durchschnittsergebnisse anzuzeigen, die in den Messmodi in der Reihenfolge Gen, AC und schließlich PC gespeichert sind.

3. Verlassen Sie den Speicher des Messgeräts. Halten Sie **M** gedrückt. Das Messgerät schaltet sich nach Anzeige des letzten Testergebnisses aus.

BEMERKUNG:

- Um den Speicher zu verlassen, halten Sie **M** 5 Sekunden lang gedrückt oder tun Sie 5 Minuten lang nichts. Das Messgerät schaltet sich automatisch aus.
- Die Testergebnisse der Kontrolllösung sind **NICHT** in den über mehrere Tage hinweg ermittelten Durchschnittsergebnissen enthalten.

MIT EINEM SMARTPHONE VERBINDEN

Dataverbindung über Bluetooth® (Bluetooth® kann optional ein- der ausgeschaltet werden)

Sie können über Bluetooth® eine Datenverbindung zwischen Ihrem Messgerät und einem Smartphone (iOS oder Android) herstellen, das über Bluetooth® verfügt. Laden Sie die GlucoCheck-App aus dem App Store oder von Google Play (iOS oder Android) herunter. Die GlucoCheck-App wurde dazu entwickelt, Sie auf einfache und intuitive Weise bei der einfachen Überwachung Ihres Blutzucker- und Ketonspiegels im Laufe der Zeit zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Kundendienst oder Händler. Sie müssen über Bluetooth® eine Verbindung zwischen Ihrem Messgerät und Ihrem Smartphone herstellen, bevor Sie Daten senden können.

Koppeln mit Ihrem Smartphone (mithilfe eines Sicherheitscodes)

1. Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones an.
2. Folgen Sie den Anweisungen über die GlucoCheck-App auf Ihrem Smartphone, um es mit Ihrem Messgerät zu verbinden.
3. Über „Suchen“ finden Sie Ihr Messgerät mit dem Namen Ht One TD Gluco xxxx (xxxx = die eindeutige 4-stellige/Buchstaben-Kombination des Bluetooth® MAC-Codes, der Ihrem Messgerät zugeordnet ist).
4. Fügen Sie Ihr Messgerät hinzu, drücken Sie  und wählen Sie „Ja“, um die Einstellungen zu speichern.
5. Nach erfolgreicher Kopplung sendet die Bluetooth®-Funktion Ihres Messgeräts Ihre Daten an die GlucoCheck-App.

Bluetooth®-Anzeige an Ihrem Messgerät:

| BLUETOOTH® ANZEIGE | STATUS |
|-------------------------------------|---|
| Blinkendes Blau | Die Bluetooth®-Funktion ist eingeschaltet und wartet auf eine Verbindung. |
| Konstant aufleuchtendes Blau | Die Bluetooth®-Kopplung ist gelungen. |

WARNUNG:

- Wenn das Messgerät Daten versendet, kann es keinen Test durchführen.
- Vergewissern Sie sich, ob Ihr Smartphone oder PC Bluetooth® SmartTechnology unterstützt und Bluetooth® aktiviert ist, bevor Sie Daten senden. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich Ihr Messgerät und Ihr Smartphone oder PC nahe beieinander befinden, um eine Verbindung herstellen zu können. Informationen zu den Anforderungen für Ihr (mobiles) Betriebssystem finden Sie im App Store oder bei GooglePlay, bevor Sie die App herunterladen und installieren.
- Die Bluetooth®-Funktionalität wurde von den verschiedenen Herstellern auf unterschiedliche Weise implementiert. Dies kann zu einem Kompatibilitätsproblem zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem Messgerät führen.

Weitere Informationen finden Sie unter ht-one.nl/support

WARTUNG

Batterie

Ihr Messgerät wird mit zwei 1,5V AAA-Alkalibatterien geliefert.

Signal bei niedrigem Batteriestand

Das Messgerät zeigt eine der folgenden Meldungen an, um Sie zu benachrichtigen, wenn die Stromversorgung des Messgeräts schwach wird.

1. **Das Symbol "☹"** erscheint zusammen mit den Meldungen auf dem Display:
Das Messgerät funktioniert und das Ergebnis bleibt genau, aber es ist Zeit, die Batterien auszutauschen.
2. **Das Symbol "☹" erscheint zusammen mit E-b, Error und Low:**
Die Stromversorgung reicht nicht aus, um einen Test durchzuführen.
Bitte ersetzen Sie die Batterien sofort.

Die Batterie austauschen (m)

Ihr Messgerät muss zum Austausch der Batterien ausgeschaltet sein.

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach links, um sie zu öffnen.
2. Entfernen Sie die beiden alten Batterien und legen Sie zwei neue 1,5 V AAA-Alkalibatterien ein.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung. Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, hören Sie einen Piepton.

BEMERKUNG:

- Das Wechseln der Batterien hat keinen Einfluss auf die im Speicher gespeicherten Testergebnisse.
- Wie alle Kleinteile müssen auch diese Batterien von Kindern ferngehalten werden. Rufen Sie sofort den Notarzt, wenn eine Batterie verschluckt wird.
- Aus Batterien können Chemikalien auslaufen, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden (d. h. 3 Monate oder länger).
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften.

Pflege Ihres Messgeräts

Reinigen

- Um die Außenseite des Messgeräts zu reinigen, wischen Sie es mit einem leicht mit Leitungswasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab und trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch ab. **NICHT** mit Wasser abspülen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Messgeräts **KEINE** organischen Lösungsmittel.

Das Messgerät lagern

- Lagerbedingungen: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F), weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit.
- Lagern oder transportieren Sie das Messgerät immer in der Original-Aufbewahrungstasche.
- Lassen Sie das Messgerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und hohe Luftfeuchtigkeit.

Das Messgerät entsorgen

Ein gebrauchtes Messgerät muss als kontaminierter Abfall behandelt werden, der während der Messung ein Infektionsrisiko darstellen kann. Die Batterien müssen aus diesem gebrauchten Messgerät entfernt und das Messgerät gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Das Messgerät fällt nicht in den Geltungsbereich der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Pflege Ihrer Teststreifen

- Lagerbedingungen: 2°C bis 32°C (35,6°F bis 89,6°F), weniger als 85% relative Luftfeuchtigkeit. **NICHT** einfrieren.
- Bewahren Sie Ihre Teststreifen nur im Originalröhrchen auf. Nicht in einen anderen Behälter überführen.
- Teststreifenpackungen kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
- Nachdem Sie einen Teststreifen aus dem Röhrchen entnommen haben, verschließen Sie die Röhrchen **sofort** fest.
- Handhaben Sie den Teststreifen nur mit sauberen und trockenen Händen.

- Verwenden Sie jeden Teststreifen sofort, nachdem Sie ihn aus dem Röhrchen genommen haben.
- Schreiben Sie beim ersten Öffnen das Öffnungsdatum auf das Etikett des Röhrchens. Entsorgen Sie alle restlichen Teststreifen nach 3 Monaten.
- Teststreifen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Dies kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
- Biegen, schneiden oder verändern Sie einen Teststreifen in keiner Weise.
- Halten Sie das Teststreifenfläschchen von Kindern fern, da die Kappe und der Teststreifen eine Erstickungsgefahr darstellen können. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Teil verschluckt wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage in der Verpackung der Teststreifen.

Wichtige Informationen über die Kontrolllösung

- Verwenden Sie mit Ihrem Messgerät ausschließlich unsere Kontrolllösungen.
- Verwenden Sie die Kontrolllösung nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder 3 Monate nach dem ersten Öffnen. Schreiben Sie das Öffnungsdatum auf die Flasche mit der Kontrolllösung und entsorgen Sie die restliche Lösung nach 3 Monaten.
- Es wird empfohlen, den Kontrolllösungstest bei Raumtemperatur von 20°C bis 25°C (68°F bis 77°F) durchzuführen. Stellen Sie vor dem Test sicher, dass Ihre Kontrolllösung, das Messgerät und die Teststreifen die angegebene Temperatur haben.
- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch, entsorgen Sie den ersten Tropfen der Kontrolllösung und wischen Sie die Dispenserspitze ab, um eine saubere Probe und ein genaues Ergebnis zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Kontrolllösung fest verschlossen bei einer Temperatur zwischen 2°C und 30°C (35,6°F und 86°F). **NICHT** einfrieren.

PROBLEME MIT DEM SYSTEM LÖSEN

Wenn Sie die empfohlenen Maßnahmen befolgen, das Problem jedoch weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Händler.

Abllesen der Ergebnisse

| ANZEIGE | WAS SIE BEDEUTET |
|-----------------------------------|---------------------------|
| L ₀ oder 1,6 mmol/L | ≤ 1,6 mmol/L (29 mg/dL) |
| KETONE? | ≥ 13,3 mmol/L (240 mg/dL) |
| H ₁ | > 33,3 mmol/L (600 mg/dL) |

Fehlermeldungen

| ANZEIGE | WAS SIE BEDEUTET | WAS MÜSSEN SIE TUN |
|-----------------------------|--|--|
| E-b | Erscheint, wenn die Batterien (fast) leer sind. | Tauschen Sie die Batterien sofort aus. |
| E-U | Erscheint, wenn ein gebrauchter Teststreifen eingelegt oder ein Teststreifen falsch verwendet wird.* | Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. |
| E-t | Erscheint, wenn die Umgebungstemperatur höher oder niedriger als der Betriebsbereich des Systems ist. | Der Betriebsbereich des Systems beträgt liegt bei 10°C bis 40°C (50°F bis 104°F). Wiederholen Sie den Test, wenn sich Messgerät und Teststreifen im oben genannten Temperaturbereich befinden. |
| E-F | Erscheint, wenn der Teststreifen während des Countdowns entfernt wird oder wenn das Blutvolumen nicht ausreicht. | Lesen Sie die Anweisungen und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| E-O, E-A, E-C, E-E | Problem mit dem Messgerät. | Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Wenn das Messgerät immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. |

*Siehe Gebrauchsanweisung (Video) auf ht-one.nl/support oder lesen Sie die Prozedur

Probleme lösen

1. Wenn das Messgerät nach dem Einlegen eines Teststreifens keine Meldung anzeigt:

| MÖGLICHE URSACHE | WAS SIE TUN MÜSSEN |
|--|---|
| Die Batterien sind leer. | Tauschen Sie die Batterien aus. |
| Der Teststreifen wird verkehrt herum oder nicht vollständig eingelegt. | Legen Sie den Teil des Streifens mit den Kontakten in das Messgerät ein. Das Teil mit dem Kontrollfenster muss nach oben zeigen.. |
| Messgerät oder Teststreifen defekt. | Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. |

2. Wenn der Test nach dem Aufbringen der Probe nicht beginnt:

| MÖGLICHE URSACHE | WAS SIE TUN MÜSSEN |
|---|---|
| Unzureichende Menge an Blutprobe. | Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Verwenden Sie eine Blutprobe mit einer größeren Menge. |
| Fehlerhafter Teststreifen. | Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. |
| Die Probe wurde nach dem automatischen Ausschalten aufgetragen (3 Minuten nach der letzten Benutzeraktion). | Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Tragen Sie die Probe erst dann auf, wenn ein blinkendes "●" -Symbol auf dem Display erscheint. |
| Defekt am Messgerät. | Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. |

3. Wenn das Testergebnis der Kontrolllösung außerhalb des angegebenen Bereichs liegt:

| MÖGLICHE URSACHE | WAS SIE TUN MÜSSEN |
|---|--|
| Fehler beim der Durchführung des Tests. | Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und wiederholen Sie den Test. |
| Die Kontrolllösungsflasche wurde nicht gut geschüttelt. | Schütteln Sie die Kontrolllösung gut und wiederholen Sie den Test. |
| Abgelaufene oder kontaminierte Kontrolllösung. | Überprüfen Sie das Ablaufdatum und Ihr erstes Öffnungsdatum der Kontrolllösung. |
| Kontrolllösung ist zu warm oder zu kalt. | Kontrolllösung, Messgerät und Teststreifen müssen zum Testen Raumtemperatur von 20°C bis 25°C (68°F bis 77°F) haben. |
| Fehlerhafter Teststreifen. | Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. |
| Störung im Messgerät. | Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Das Messgerät und der Teststreifen funktionieren nicht richtig. | Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. |

DETAILLIERTE INFORMATIONEN













1. Das Messgerät liefert plasmaäquivalente Ergebnisse::

| | |
|-------------------------------|--|
| Zeitpunkt des Tages | Normaler Plasmaglukosebereich beim Menschen ohne Diabetes (mg/dl) |
| Fasten und vor dem Essen | < 5,6 mmol/L (100 mg/dL) |
| 2 Stunden nach den Mahlzeiten | < 7,8 mmol/L (140 mg/dL) |

Quelle: American Diabetes Association. Standards der medizinischen Versorgung bei Diabetes- 2016;39 (Ergänzung 1 Diabetes Care):S16.

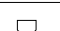Konsultieren Sie Ihren Arzt, um einen Zielbereich zu bestimmen, der für Sie am besten geeignet ist.

INFORMATIONEN ZU DEN SYMBOLEN

| SYMBOL | REFERS TO | SYMBOL | REFERS TO |
|---|---|---|---|
|  | Medizinisches Gerät zur <i>In-vitro</i> -Diagnostik |  | Hersteller |
|  | Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung |  | Seriennummer |
|  | Temperaturgrenze |  | Anerkannter Vertreter in der Europäischen Union |
|  | Zu verwenden vor |  | Achtung! Bitte beachten Sie die beiliegende Dokumentation |
|  | Charge |  | Entsorgen gemäß den Vorschriften |
|  | CE-Label |  | Beschränkung der Luftfeuchtigkeit |

SPECIFIKATIONEN

Modellnummer: TD-4277B

Abmessungen und Gewicht: 96 (L) x 61(B) x 26 (H) mm, 67,2 g

Stromquelle: Zwei 1,5V AAA-Alkalibatterien

Display: LCD

Speicher: 1.000 Messergebnisse mit den zugehörigen Parametern, Datum und Uhrzeit.

Externer Ausgang: Bluetooth®

Automatische Erkennung der Elektrodenplatzierung

Automatische Erkennung der Probenladung

Automatischer Countdown der Reaktionszeit

Automatische Abschaltung nach 5 Minuten ohne Aktion

Temperaturalarm

Betriebsbedingungen:

10°C bis 40°C (50°F bis 104°F), weniger als 85% relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Lager- / Transportbedingungen des Messgeräts:

-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F), weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit

Lager- / Transportbedingungen der Messstreifen:

2°C bis 32°C (35,6°F bis 89,6°F), weniger als 85% relative Luftfeuchtigkeit

Maßeinheit:

mmol/l

Messbereich:

1,6 bis 33,3 mmol/l (29 bis 600 mg/dl)

Dieses Gerät wurde getestet, um die elektrischen und Sicherheitsanforderungen von
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, EN 61326-1, IEC/EN 61326-2-6, EN 301489-17,
EN 301489-1, EN 300 328.

NOTIZEN



 TaiDoc Technology Corporation
Bi.7F, No.127, Wugong 2nd Rd.,
Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan




EC REP MedNet EC-REP GmbH
BorkstraBe 10, 48163 Münster, Germany

Import Europa: HT Medical BV

Distributor: **GD Medical Pharma BV**
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven, Niederlande,
info@gdmedicalpharma.nl

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch HT Medical B.V. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Für Selbsttests

 **0123**  

TD-4277B