

Ht one

Steriele lancetten voor éénmalig gebruik



Universeel model, geschikt voor de meest voorkomende prikapparaten

Eenvoudig te gebruiken prikapparaten

Universeel model, geschikt voor de meest voorkomende lancetten



HT One lancetten

UNIVERSEEL
MODEL

De HT One steriele lancetten voor éénmalig gebruik zijn geschikt voor de meest voorkomende prikapparaten.

De lancetten zijn leverbaar in 28G en 30G naald diameter Gauge en verpakt in een doosje van 100 stuks. HT One Lancetten zijn zeer eenvoudig in gebruik, zeker in combinatie met de HT One Prikapparaten.







HT One prikapparaat

- ✓ Eenvoudig in gebruik.
- ✓ Veilige verwijdering van de gebruikte lancet.
- ✓ 5 prikniveaus.
- ✓ Universeel model.
Geschikt voor de meest voorkomende lancetten.




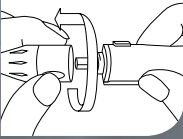

Draai het bovenstuk van het prikapparaat.

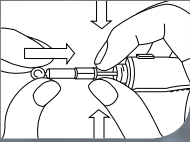


Zet een ongebruikte lancet in de houder en zorg ervoor dat deze er tot de bodem in zit. Verwijder het beschermdopje van de lancet. En draai het bovenstuk weer op het apparaat.

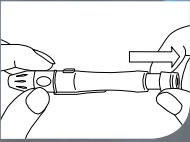

Span het prikapparaat aan door aan het uiteinde te trekken.



Hou het prikapparaat stevig tegen de vinger en druk op de prikknop.

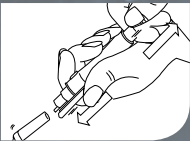

Draai het bovenstuk van het prikapparaat en druk de lancet in het beschermdopje. Verwijder de lancet veilig, druk met de duim de uitwerpknop naar voren en trek tegelijkertijd het uiteinde van het prikapparaat naar achteren.




HT One prikapparaat




- ✓ Veilig en eenvoudig plaatsen/verwijderen van lancetten.
- ✓ Uitgelijnd en gekalibreerd prikmechanisme (minder pijnlijk).
- ✓ 7 prikniveaus.
- ✓ Ergonomische vormgeving.
- ✓ Indicatievenster voor spanning.




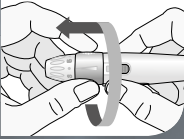


Schroef de dop van het prikapparaat (tegen de klok in) terwijl u het prikapparaat met uw andere hand stevig vasthoudt.

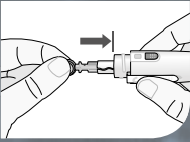


Stop een nieuwe steriele lancet volledig in de lancethouder.

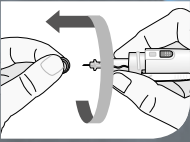


Draai voorzichtig het beschermdopje van de lancet.

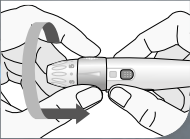


Schroef de dop van het prikapparaat (met de klok mee) terug op het prikapparaat.

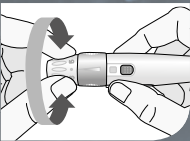


Stel het door u gewenste prikniveau in door middel van de verstelbare dop. 1-3 for zachte of dunne huid, 4 voor normale huid, 5-7 voor dikke of eeltachtige huid.

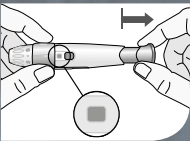


Houd het prikapparaat stevig vast met één hand en trek het spanmechanisme in tegengestelde richting naar buiten met uw andere hand totdat deze niet verder gaat. Het indicatievenster kleurt rood als uw prikapparaat gespannen is.

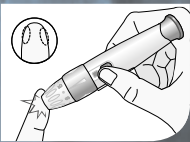

Plaats het prikapparaat op de door u gewenste prikplaats tegen uw vinger. U hoeft daarbij geen druk te zetten (des te harder u drukt, des te dieper de prik). Druk vervolgens op de prikknop (u voelt een prikje) en verwijder het prikapparaat om uw bloedmonster te kunnen testen.

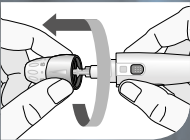

Na afloop van uw bloedglucosemeting draait u de dop van het prikapparaat (tegen de klok in) terwijl u het prikapparaat stevig vasthoudt. Druk de lancet in het beschermdopje.

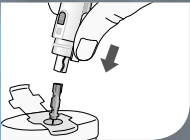

Druk met uw duim het uitwerpmechanisme voor lancetten naar voren totdat de gebruikte lancet is verwijderd. Gooi de gebruikte lancet alleen weg in een speciaal hiervoor bestemde naaldencontainer.



Omschrijving	HT One Lancetten 28G
Artikelnummer	GD100141
Verpakking	Doosje
Inhoud	100 stuks
Afm. verpakking (lxbxh)	75 x 45 x 65 mm
EAN nummer	8718692270091
Z-Index nummer	15938190
Naald diameter Gauge	28 Gauge

Omschrijving	HT One Lancetten 30G
Artikelnummer	GD100194
Verpakking	Doosje
Inhoud	100 stuks
Afm. verpakking (lxbxh)	75 x 45 x 65 mm
EAN nummer	8718692270398
Z-Index nummer	16034309
Naald diameter Gauge	30 Gauge

Omschrijving	HT One Prikapparaat
Artikelnummer	GD100142
Verpakking	Doosje
Inhoud	1 stuks
Afm. verpakking (lxbxh)	120 x 25 x 25 mm
EAN nummer	8718692270107
Z-Index nummer	15932249

Omschrijving	HT One Prikapparaat Soft
Artikelnummer	GD100259
Verpakking	Doosje
Inhoud	1 stuks
Afm. verpakking (lxbxh)	120 x 25 x 25 mm
EAN nummer	8718692270787
Z-Index nummer	16168348

HT One lancetten en prikapparaten zijn CE gecertificeerde medische hulpmiddelen.



Medical Pharma

Distributeur: **GD Medical Pharma BV**
 Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
www.ht-one.nl
 Telefoon 040-3031090
info@gdmedicalpharma.nl