


# GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIKAPPARAAT EN STERIELE LANCET

318-5011100-007  
Ver 1.1 2020/03

Het prikapparaat wordt gebruikt met steriele lancetten (universeel) om gemakkelijk en vrijwel pijnvrij capillair bloed uit de vingertop te halen. De prikpen is bedoeld voor gebruik door één patiënt.

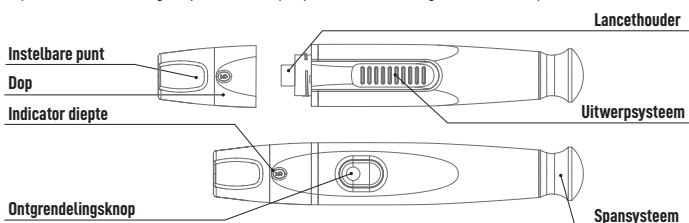


## WAARSCHUWING

- Deel de lancetten en het prikapparaat niet met anderen.
- Gebruik altijd een nieuw steriel lancet. Lancetten zijn alleen geschikt voor eenmalig gebruik.
- Zorg dat er geen handcrème, vetigheid of vuil in of op de lancetten en het prikapparaat komt.
- Het gebruikte lancet kan biologisch gevaarlijk materiaal zijn. Verwijder deze daarom volgens de daarvoor bestemde lokale voorschriften.


## Vorbereiding van het prikapparaat

1

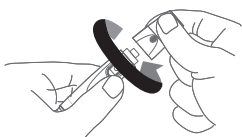


Draai de dop en trek de dop van het prikapparaat.

2

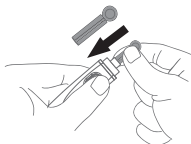


Breng het lancet in de houder en druk deze stevig aan tot het goed vastzit.

3

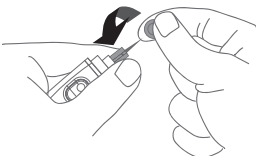


Draai het beschermplaatje van het lancet.

4

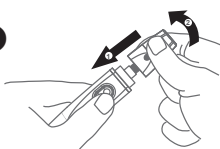


Draai de dop terug op het prikapparaat.

5

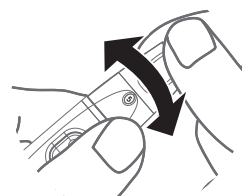

Houd uw vinger op de dop van het diepte-nummer. Selecteer de gewenste penetratiediepte door de verstelbare punt te draaien zoals afgebeeld.

6

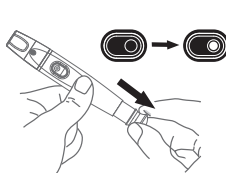


Trek de spanhendel naar achteren totdat deze klikt. U ziet een kleurverandering in de ontgrendelknop wanneer deze gereed is.

Aanpassing:

- 1 - 3 zachte tot gevoelige huid
- 4 - 6 normale huid
- 7 - 9 dikke tot eeltige huid

7

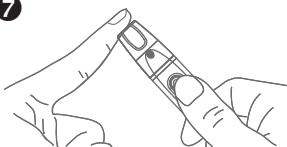

### Het aanprikken van de vinger

Druk de punt van het prikapparaat stevig tegen de onderkant van uw vingertop. Druk op de ontgrendelknop om in uw vinger te prikken en een klik geeft aan dat de punctie voltooid is.

8



Verwijder het apparaat van de prikplaats.


Knijs zachtjes in het aangeprikte gebied om een druppel bloed te verkrijgen. Pas op dat u het bloedmonster **NIE**T uitsmeert. Laat het bloed opzuigen in uw teststrip.

## OPMERKING:

Voordat u een bloedprik uitvoert;


- Was uw handen goed voordat u een bloedprik uitvoert
- Droog uw handen goed na het wassen
- Kies de juiste prikplaats (bij voorkeur aan de zijkant van uw vinger)
- Wrijf de gekozen prikplaats zo'n 20 seconden voordat u prikt

9

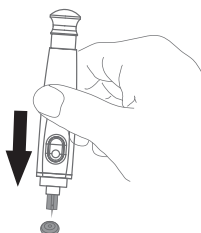

Schroef eerst de dop van de prikken los. Plaats het beschermplaatje van het lancet op een hard oppervlak en steek de lancetnaald voorzichtig in het beschermplaatje.


10

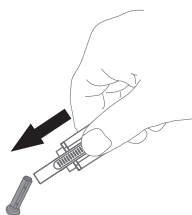

Schuif de uitwerper naar voren om het gebruikte lancet te verwijderen. Gooi het lancet weg volgens de plaatselijke voorschriften.

## Alternatieve prikplaatsen (AST)

De AST dop wordt niet standaard meegeleverd. Deze dient apart besteld te worden.

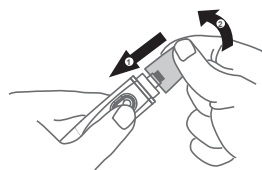

### NB:

Deze mogelijkheid is niet voor alle bloedglucosemeters beschikbaar. Lees de gebruiksaanwijzing van de bloedglucosemeter om te zien of u met uw systeem AST kunt uitvoeren.

Het aanprikken van een andere plek dan de vingertop wordt ook wel het gebruik van alternatieve prikplaatsen (alternative site testing - AST) genoemd. Lees de rubriek **'Alternatieve prikplaatsen'** in de gebruiksaanwijzing van uw bloedglucosemeter voordat u een andere prikplaats dan de vingertop aanpikt. Vervang de dop van het prikapparaat door de doorzichtige dop voor alternatieve prikplaatsen. Trek het spansysteem terug tot u een klik hoort. Wanneer u de onderarm, bovenarm, hand, dij of kuit aanpikt, let dan op dat u niet prikt in een gebied waar de bloedvaten duidelijk te zien zijn. Dit kan namelijk een bloeding veroorzaken.

## Prikpen en dop reinigen en desinfecteren

Het disposable lancet is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Het prikapparaat is herbruikbaar.

Gebruik een milde zeep en water om het prikapparaat schoon te vegen. Spoel het apparaat **NIET** onder water.

Desinfecteer de dop door deze gedurende 10 minuten in een 70% alcoholoplossing te plaatsen en vervolgens aan de lucht te laten drogen. Plaats het apparaat **NIET** in een vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen.

### Let op:

1. Als het testresultaat dat is verkregen door de bloedprik overeenkomt met hoe u zich voelt, neem dan contact op met uw arts.
2. Als de prikken wordt bediend door een tweede persoon die de gebruiker assistentie verleent bij het testen, moet de prikken voor gebruik door de tweede persoon worden gereinigd en gedesinfecteerd. De tweede persoon moet beschermende handschoenen dragen voor alle stappen bij het verlenen van assistentie bij het testen.

3. Houd het prikapparaat en het lancet altijd met al zijn onderdelen uit de buurt van kinderen.
4. Bewaar de prikken alleen zonder dat een lancet is geplaatst.
5. Een ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant.

## Uitleg symbolen

| Symbool | Referentie                                        |
|---------|---------------------------------------------------|
|         | Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing           |
|         | Fabrikant                                         |
|         | Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie |
|         | Batchcode                                         |
|         | CE-markering voor de lancet                       |
|         | Niet opnieuw gebruiken (alleen lancet)            |
|         | Te gebruiken vóór (alleen lancet)                 |
|         | Gesteriliseerd door gammastraling (alleen lancet) |
|         | Let op                                            |
|         | RoHS conformiteit                                 |
|         | Medisch apparaat                                  |
|         | CE Mark voor het prikapparaat                     |



TaiDoc Technology Corporation  
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan



MedNet EC-REP GmbH  
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

Import Europa: HT Medical BV  
Distributeur: **GD Medical Pharma BV**  
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven info@gdmedical.nl

Model No. of Sterile Lancet: TD-5084  
Model No. of Lancing Device: TD-5011

