


# TD GLUCO

 Bluetooth®

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE

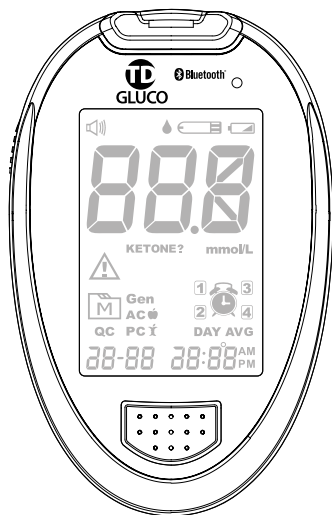

## Mode d'emploi

**Ht**one

TD-4277B version 2.0 2016/03  
HT102015B-01G  
311-4277200-002



## TD-GLUCO Bluetooth (TD-4277B)

Nous vous remercions d'avoir acheté le système de surveillance de la glycémie TD-GLUCO Bluetooth. Ce manuel fournit des informations importantes sur l'utilisation correcte du système. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser ce produit.

Une surveillance régulière de votre glycémie peut vous aider, vous et votre médecin, à mieux contrôler votre diabète. Grâce à sa taille compacte et à sa facilité d'utilisation, vous pouvez utiliser le système de surveillance de la glycémie TD-GLUCO Bluetooth pour mesurer facilement vous-même votre taux de glycémie, à tout moment.

Si vous avez d'autres questions sur ce produit, veuillez contacter votre service clientèle local ou votre fournisseur.

### Utilisation prévue

Ce système est destiné à être utilisé à l'extérieur du corps (utilisation pour le diagnostic in-vitro), à domicile par les personnes diabétiques et en milieu clinique par le personnel de santé comme outil de surveillance de l'efficacité du contrôle du diabète. Il est destiné à la mesure quantitative du glucose (sucre) dans des échantillons de sang total frais (prélevés sur le doigt, la paume, l'avant-bras et le bras).

Le système ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le dépistage du diabète ou pour des tests sur des nouveau-nés.

Les professionnels peuvent effectuer le test avec des échantillons de sang capillaire et veineux ; seul le sang capillaire peut être testé à domicile.



# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À LIRE AVANT L'UTILISATION






1. Utilisez l'appareil **UNIQUEMENT** pour l'usage prévu décrit dans ce manuel.
2. **NE PAS** utiliser d'accessoires qui ne sont pas spécifiés par le fabricant.
3. N'utilisez **PAS** l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé.
4. N'utilisez **JAMAIS** l'appareil sur des nouveau-nés ou de jeunes enfants.
5. Cet appareil n'est **PAS** destiné à traiter des symptômes ou des maladies.  
Les données mesurées sont données à titre indicatif. Consultez toujours votre médecin pour l'interprétation des résultats.
6. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et vous exercer au test avant d'utiliser cet appareil pour mesurer la glycémie. Effectuez tous les contrôles de qualité conformément aux instructions.
7. Gardez l'appareil et l'équipement de test hors de portée des jeunes enfants.  
Les petites pièces telles que le couvercle de la pile, les piles, les bandelettes de test, les lancettes et les bouchons de flacon présentent un risque d'étouffement.
8. L'utilisation de cet instrument dans un environnement sec, en particulier si des matériaux synthétiques sont présents (vêtements synthétiques, tapis, etc.), peut provoquer une décharge d'électricité statique entraînant des résultats erronés.
9. N'utilisez **PAS** cet instrument à proximité de sources de fortes radiations électromagnétiques, car celles-ci peuvent interférer avec son fonctionnement précis.
10. Un bon entretien est essentiel pour la durée de vie de votre appareil. Si vous avez des doutes sur l'exactitude de vos mesures, contactez votre service clientèle local ou votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR**

# CONTENU

<b>AVANT DE COMMENCER</b>	<b>07</b>
Informations importantes	07
Vue d'ensemble du lecteur	08
Écran d'affichage	09
Bandelette de test	09
<b>RÉGLAGE DU LECTEUR</b>	<b>10</b>
<b>LES QUATRE MODES DE MESURE</b>	<b>11</b>
<b>TEST DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ</b>	<b>12</b>
Test avec la solution de contrôle	12
Effectuer un test avec la solution de contrôle	12
<b>TESTS SUR DES ÉCHANTILLONS DE SANG</b>	<b>14</b>
Préparation de l'autopiqueur pour une prise de sang	14
Préparation du site de ponction	14
Effectuer un test de glycémie	15
<b>MÉMOIRE DU LECTEUR</b>	<b>17</b>
Afficher les résultats des tests	17
Visualisation des résultats moyens de la glycémie sur un certain nombre de jours	17
<b>SE CONNECTER AU SMARTPHONE</b>	<b>18</b>
<b>ENTRETIEN</b>	<b>20</b>
Batterie	20
Prendre soin de votre appareil de mesure	21
Prendre soin de vos bandelettes de test	21
Informations importantes sur la solution de contrôle	22
<b>RÉSOUTRE LES PROBLÈMES AVEC LE SYSTÈME</b>	<b>23</b>
Lecture des résultats	23
Messages d'erreur	23
Dépannage	24
<b>INFORMATION DÉTAILLÉE</b>	<b>25</b>
<b>INFORMATIONS SUR LES SYMBOLES</b>	<b>25</b>
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	<b>26</b>

(a) (b) (c) (d)\* (e) (f)

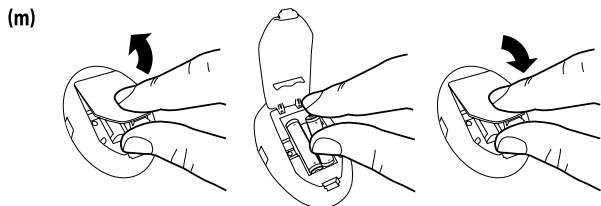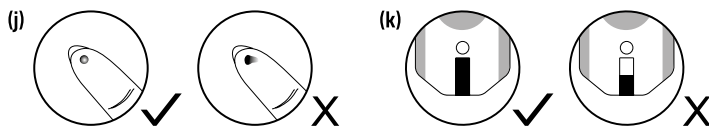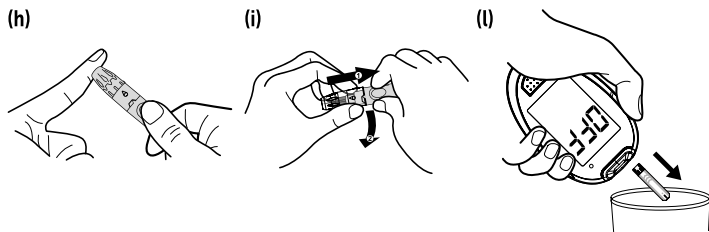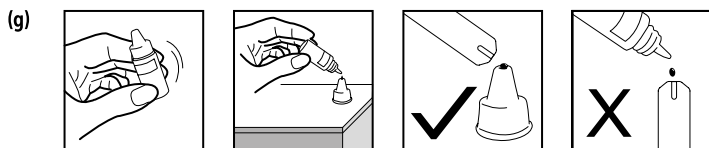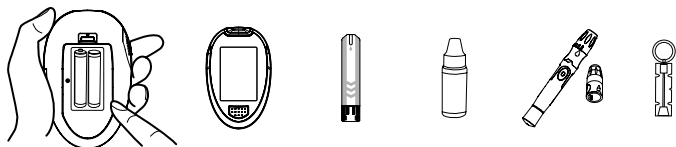


## AVANT DE COMMENCER

### Informations importantes

- Une déshydratation sévère et une perte excessive de liquide peuvent conduire à des mesures inférieures aux valeurs réelles. Si vous pensez souffrir d'une déshydratation sévère, contactez immédiatement votre médecin.
- Si votre glycémie est inférieure ou supérieure à la normale et que vous ne présentez aucun symptôme de maladie, refaites le test. Si vous avez des symptômes ou si vous continuez à avoir des résultats supérieurs ou inférieurs à la normale, suivez les conseils de votre médecin en matière de traitement.
- N'utilisez que des échantillons de sang frais pour mesurer votre glycémie. L'utilisation d'autres substances conduit à des résultats incorrects.
- Si vous présentez des symptômes qui ne correspondent pas aux résultats de votre test de glycémie et que vous avez suivi toutes les instructions de ce manuel, contactez votre professionnel de santé.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de ce produit chez les personnes dont la tension artérielle est fortement réduite ou chez les patients en état de choc. Consultez votre médecin avant de l'utiliser.

\* Le fluide de contrôle n'est pas inclus dans le pack de démarrage.

## Vue d'ensemble du lecteur

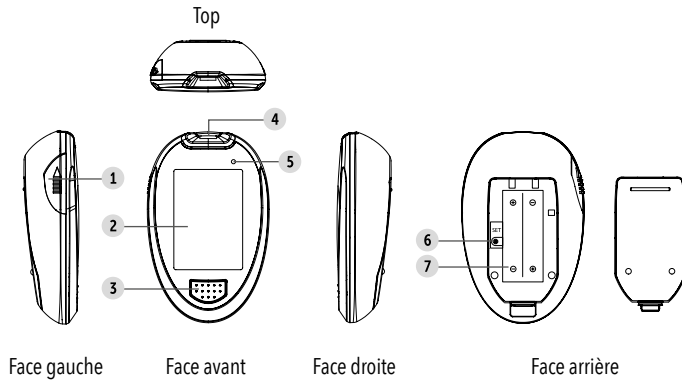

### 1 Éjection de la bandelette de test

Éjectez la bandelette usagée en poussant ce bouton vers le haut.

### 2 Écran d'affichage

### 3 Bouton principal (M)

Ouvrez la mémoire du lecteur et activez/désactivez une alarme de rappel.

### 4 Fente pour bandelette réactive avec indicateur de bandelette

Insérez la bandelette réactive pour mettre le lecteur en marche et effectuer des tests.

### 5 Indicateur Bluetooth

### 6 Bouton SET (S)

Entrez et confirmez les paramètres du lecteur.

### 7 Compartiment de la batterie

## Écran d'affichage

### 1 Résultat du test

### 2 Avertissement sur les cétones

### 3 Avertissement d'erreur

### 4 Symbole de mémoire

### 5 Mode de solution de contrôle

QC (contrôle de la qualité) - test avec une solution de contrôle

### 6 Mode de mesure

AC - avant le repas

PC - après le repas

Gen - à tout moment de la journée

### 7 Date

### 8 Heure

### 9 Moyenne sur un certain nombre de jours


### 10 Symbole d'alarme

### 11 Unité de mesure


### 12 Symbole de batterie faible

### 13 Symbole de la bandelette réactive

### 14 Symbole de la goutte de sang

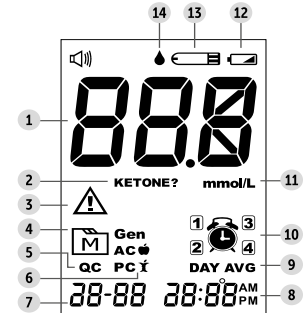

## Bandelette de test

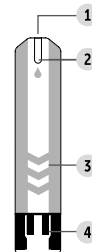

### 1 Ouverture absorbante

### 2 Fenêtre de contrôle

### 3 Prise de la bandelette réactive

### 4 Tiges de contact

#### PLEASE NOTE:

Le bord avant de la bandelette réactive doit être orienté vers le haut lorsque vous l'insérez. Les résultats peuvent être incorrects si la tige de contact n'est pas entièrement insérée dans la fente de test.

#### NOTE:

Le lecteur Bluetooth TD-GLUCO ne peut être utilisé qu'avec les bandelettes réactives TD-GLUCO TD-4360. L'utilisation d'autres bandelettes réactives avec ce lecteur peut donner des résultats inexacts.

# RÉGLAGE DU LECTEUR

Avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou de changer la pile du lecteur, vous devez vérifier et mettre à jour ces paramètres.

## Entrer dans le mode de réglage (a)

Commencez par éteindre le lecteur (sans insérer de bandelette réactive).

Appuyez sur le bouton **S** à côté des piles.

### 1. Réglage de la date

L'ordre de réglage de la date est le suivant : ANNÉE → MOIS → JOUR. Lorsque ANNÉE/MOIS/JOUR clignotent en séquence, appuyez sur **M** jusqu'à ce que l'année/mois/jour correct apparaisse. Appuyez sur **S**.

### 2. Réglage du format de l'heure

Appuyez sur le bouton principal **M** situé devant le lecteur pour sélectionner le format horaire souhaité --- 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur **S**.

### 3. Réglage de l'heure

Lorsque HEURE/MINUTES clignotent en séquence, appuyez sur **M** jusqu'à ce que l'heure/minutes corrects apparaisse. Appuyez sur **S**.

### 4. Activer/désactiver le son

Permet d'activer ou de désactiver le son du lecteur. Appuyez sur **M** pour passer de « On » à « Off ». Appuyez sur **S**.

### 5. Réglage de l'alarme de rappel

Votre lecteur dispose de quatre alarmes de rappel. Le lecteur affiche « OFF » et «  ».

Si vous ne souhaitez pas définir d'alarme, appuyez sur **S** pour ignorer cette étape.

Ou appuyez sur **M** pour sélectionner « On », puis appuyez sur **S**.

Lorsque heure/minutes clignotent en séquence, appuyez sur **M** pour sélectionner l'heure/minutes corrects. Appuyez sur **Sen** pour passer au réglage suivant de l'alarme.

## ATTENTION:

Si l'alarme se déclenche : Appuyez sur **M** pour faire taire l'alarme ; appuyez et maintenez **M** pour éteindre l'alarme ; ou l'alarme retentit pendant 2 minutes puis s'éteint automatiquement.


**Félicitations ! Vous avez saisi tous les paramètres !**

## NOTE:

- Ces paramètres peuvent être modifiés **UNIQUEMENT** en mode réglage.
- Si le lecteur n'est pas utilisé pendant 5 minutes en mode réglage, il s'éteint automatiquement.

## LES QUATRE MODES DE MESURE

Le lecteur vous propose quatre modes de mesure, General (général), AC (avant le repas), PC (après le repas) et QC (contrôle de la qualité). Vous pouvez passer d'un mode à l'autre comme suit :

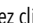1. Commencez avec le lecteur éteint. Insérez une bandelette réactive pour mettre le lecteur en marche. Sur l'écran, vous verrez clignoter «  » et « Gen ».
2. Appuyez sur **M** pour basculer entre les modes Général, AC, PC et QC.

# TEST DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

**Ce test avec la solution de contrôle n'est pas nécessaire lors de l'utilisation du système de surveillance de la glycémie TD-GLUCO Bluetooth.**

## Tester avec la solution de contrôle

Quand faut-il effectuer un test avec un fluide de contrôle ?

- Lorsque vous pensez que le lecteur ou les bandes réactives ne fonctionnent pas correctement.
- Si les résultats de votre test ne correspondent pas à ce que vous ressentez, ou si vous soupçonnez que les résultats ne sont pas exacts.
- Lors de la pratique de la procédure de test.
- Si vous avez fait tomber le lecteur ou si vous pensez qu'il a été endommagé.

Les bandelettes de test **(c)**, le fluide de contrôle **(d)**, l'autopiqueur **(e)** ou les lancettes stériles **(f)** peuvent ne pas être inclus dans le kit (veuillez vérifier le contenu sur l'emballage du produit). Ces articles peuvent être commandés séparément.

## Effectuer un test avec le fluide de contrôle.

Pour effectuer un test avec le fluide de contrôle, vous avez besoin de **(b)**, **(c)** et **(d)**.

### 1. Insérez la bandelette réactive dans le lecteur pour le mettre en marche.

Attendez que le lecteur indique "←" et un "●" clignotant.

### 2. Appliquer le fluide de contrôle (g)

Agitez bien le flacon de contrôle avant de l'utiliser. Pressez la première goutte et essuyez-la. Pressez une autre goutte du flacon et mettez-la sur l'extrémité du bouchon. Tenez le lecteur de façon à ce que l'ouverture absorbante de la bandelette réactive touche la goutte et absorbe le fluide de contrôle. Dès que la fenêtre de contrôle de la bandelette est complètement remplie, le lecteur commence à décompter automatiquement.

### AVERTISSEMENT :

Lorsque vous effectuez le test avec la solution de contrôle, vous devez le marquer afin que le résultat du test **ne soit PAS** confondu avec les **RÉSULTATS DU TEST** de glycémie en mémoire. Si vous ne le faites pas, les résultats des tests de glycémie seront mélangés avec les résultats des tests avec la solution de contrôle dans la mémoire.

### 3. Lire le résultat et comparer

Après le compte à rebours jusqu'à **0**, le résultat du test avec la solution de contrôle s'affiche à l'écran. Comparez ce résultat avec la fourchette indiquée sur l'emballage des bandelettes réactives. Le résultat doit se situer dans ces valeurs. Si ce n'est pas le cas, relisez les instructions et répétez le test avec la solution de contrôle.

### NOTE:

- La plage de valeurs pour la solution de contrôle indiquée sur le tube de la bandelette réactive est uniquement destinée à être utilisée avec la solution de contrôle. Il ne s'agit pas d'une fourchette recommandée pour votre glycémie.
- Consultez la section **ENTRETIEN** pour obtenir des informations importantes sur votre solution de contrôle.

# TESTS SUR DES ÉCHANTILLONS DE SANG

## AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'infection

- Ne partagez jamais une lancette ou l'autopiqueur avec quiconque.
- Utilisez toujours une lancette neuve et stérile. Les lancettes sont destinées à un usage unique.
- Ne mettez pas de lotion pour les mains, d'huile, de saleté ou de résidus dans ou sur les lancettes et l'autopiqueur.

## Préparation de l'autopiqueur pour une prise de sang

Suivez les instructions de la notice accompagnant l'autopiqueur pour prélever un échantillon de sang.

## Préparation du site de ponction

Stimuler la perfusion sanguine en frottant le site de ponction avant la prise de sang a une grande influence sur la valeur de glucose obtenue.

### Suivez les suggestions ci-dessous avant de prélever une goutte de sang :

- Lavez et séchez vos mains avant de commencer
- Nettoyez le site de ponction avec un coton-tige imbibé d'alcool à 70 % et laissez la peau sécher à l'air libre.
- Frottez le site de ponction pendant environ 20 secondes avant de ponctionner
- Utilisez un capuchon propre (inclus dans le kit) lors de la mise en place de l'autopiqueur
- Testez sur le bout du doigt (h)  
Appuyez fermement l'extrémité de l'autopiqueur contre la partie inférieure du bout de votre doigt. Appuyez sur le bouton de déclenchement pour piquer votre doigt ; un clic indique que la piqûre est terminée.

## NOTE

- Choisissez un endroit différent chaque fois que vous effectuez un test. Des piqûres répétées au même endroit peuvent provoquer des plaies et des callosités.
- Il est recommandé de jeter la première goutte de sang car elle peut contenir du fluide tissulaire qui pourrait affecter le résultat du test.

## Effectuer un test de glycémie

Pour effectuer un test de glycémie, vous avez besoin des éléments suivants : **(b), (c), (e) et (f)**

### 1. Insérez une bandelette réactive pour mettre le lecteur en marche

Attendez que le lecteur indique "☐" et un "▲".

### 2. Sélectionnez le mode de mesure souhaité en appuyant sur M

### 3. Prélever un échantillon de sang (j)

Utilisez l'autopiqueur pré-réglé pour piquer le site souhaité. Essayez la première goutte de sang avec un coton-tige propre. La taille de la gouttelette doit être au moins aussi grande que la taille (réelle), soit un volume de 0,5 microlitre ( $\mu\text{l}$ ). Pressez doucement sur le site de ponction pour obtenir une autre goutte de sang. Veillez à ne pas souiller l'échantillon de sang.

### 4. Appliquer l'échantillon (k)

Insérez délicatement la goutte de sang en biais dans l'ouverture absorbante de la bandelette réactive. La fenêtre de contrôle doit être complètement remplie si un échantillon de sang suffisant a été appliqué. **NE PAS** retirer votre doigt avant d'entendre un bip.



#### NOTE:

- N'appuyez pas le site de ponction contre la bandelette réactive et n'essayez pas d'étaler le sang.
- Si un échantillon de sang n'est pas placé sur la bandelette réactive dans les 5 minutes, le lecteur s'éteint automatiquement. Vous devez alors retirer la bandelette réactive et réinsérer une nouvelle bandelette pour commencer un nouveau test.
- La fenêtre de contrôle doit être remplie de sang avant que le lecteur ne lance un compte à rebours automatique. **N'essayez JAMAIS** d'ajouter du sang à la bandelette réactive après que la goutte de sang a été prélevée. **Jetez la bandelette usagée et testez à nouveau avec une nouvelle bandelette.**
- Si vous rencontrez des difficultés à remplir la fenêtre de contrôle, contactez votre professionnel de santé ou le service clientèle local pour obtenir de l'aide.

#### 5. Lire votre résultat.

Le résultat de votre test de glycémie apparaît lorsque le compteur a décompté jusqu'à 0. La valeur de la glycémie est automatiquement enregistrée dans la mémoire.

#### 6. Éjecter la bandelette d'essai usagée (L)

Éjectez la bandelette réactive en appuyant sur le bouton d'éjection situé sur le côté. Utilisez une poubelle spéciale pour jeter les bandelettes réactives usagées. Le lecteur s'éteint automatiquement.

**Suivez toujours les instructions de la notice de l'autopiqueur lorsque vous retirez la lancette.**

#### NOTE:

La lancette et la bandelette utilisées peuvent présenter un risque biologique. Mettez-les au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations locales.

## MÉMOIRE DU LECTEUR

Le lecteur garde en mémoire les **1000** derniers résultats de tests de glycémie, avec les dates et heures correspondantes. Pour accéder à la mémoire du lecteur, commencez avec un lecteur éteint.

### Afficher les résultats des tests

#### 1. Appuyez sur **M** et relâchez le bouton.

"**M**" apparaît sur l'écran. Appuyez de nouveau sur **M** et la première lecture qui s'affiche est le dernier résultat de la glycémie, ainsi que la date, l'heure et le mode de mesure.

#### 2. Appuyez sur **M** pour rappeler les résultats des tests enregistrés dans le lecteur à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. **Après le dernier résultat, appuyez à nouveau sur **M** et le compteur s'éteint.**

### Visualisation des résultats moyens de la glycémie sur un certain nombre de jours

1. **Appuyez sur **M** et relâchez le bouton.** Lorsque "**M**" apparaît à l'écran, appuyez sur **M** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le message clignotant « **DAY AVG** » (moyenne des jours) apparaisse. Relâchez **M**; vos résultats moyens sur 7 jours, mesurés en mode général, s'affichent à l'écran.
2. **Appuyez sur **M** pour afficher les résultats moyens** sur 14, 21, 28, 60 et 90 jours enregistrés dans chaque mode de mesure dans l'ordre Gen, AC puis PC
3. **Quitter la mémoire du lecteur.** Continuez à appuyer sur la touche **M**; le lecteur s'éteint après avoir affiché le dernier résultat de la mesure.

#### NOTE:


- Pour quitter la mémoire, appuyez sur **M** pendant 5 secondes ou ne faites rien pendant 5 minutes. Le lecteur s'éteint automatiquement.
- Les résultats des tests avec la solution de contrôle **ne** sont **PAS** inclus dans la moyenne journalière

# SE CONNECTER AU SMARTPHONE

## Connexion de données via Bluetooth® (le Bluetooth® peut être activé ou désactivé)

Vous pouvez établir une connexion de données entre votre compteur et un smartphone compatible Bluetooth® (iOS ou Android) via Bluetooth®. Téléchargez l'application GlucoCheck sur l'App Store ou Google Play (iOS ou Android). L'application GlucoCheck est conçue pour vous aider à surveiller facilement et intuitivement votre glycémie et vos taux de cétone au fil du temps. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle ou le fournisseur local pour obtenir de l'aide. Vous devez coupler votre lecteur avec votre smartphone via Bluetooth® avant de pouvoir envoyer des données.

### Appairage (par code de sécurité) avec votre smartphone

1. Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone.
2. Suivez les instructions de l'application GlucoCheck sur votre smartphone pour la connecter à votre lecteur.
3. En cliquant sur « Rechercher », vous trouverez votre lecteur, nommé Ht One TD Gluco xxxx (xxxx = la combinaison unique de 4 chiffres/lettres du code MAC Bluetooth® associé à votre lecteur).
4. Ajoutez votre compteur, appuyez sur  et sélectionnez « Oui » pour enregistrer les paramètres.
5. Une fois l'appairage réussi, la fonction Bluetooth® de votre lecteur enverra vos données à l'application GlucoCheck.

### Indicateur Bluetooth® sur lecteur :

INDICATEUR BLUETOOTH®	STATUT
Bleu clignotant	La fonction Bluetooth® est activée et attend une connexion
Blue constant	L'appairage Bluetooth® a réussi

### AVERTISSEMENT :

- Si le lecteur envoie des données, il ne peut pas effectuer de test.
- Assurez-vous que votre smartphone ou votre PC prend en charge la technologie Bluetooth® smart et que le Bluetooth® est activé avant de transmettre des données. Assurez-vous également que votre compteur et votre smartphone ou votre PC sont à proximité l'un de l'autre afin qu'ils puissent se connecter. Pour connaître les exigences de votre système d'exploitation (mobile), veuillez consulter l'AppStore ou Google Play avant de télécharger et d'installer l'application.
- La fonctionnalité Bluetooth® a été mise en œuvre de différentes manières par les divers fabricants. Cela peut entraîner un problème de compatibilité entre votre smartphone et votre lecteur.

Pour plus d'informations, voir [ht-one.nl/support](http://ht-one.nl/support)

# ENTRETIEN

## Batterie

Votre lecteur est fourni avec deux piles alcalines AAA de 1,5V.

### Symbole de batterie faible

Le lecteur affiche l'un des messages suivants pour vous alerter lorsque l'alimentation du lecteur devient faible.

1. Le symbole "🔋" apparaît sur l'écran ainsi que des messages : Le lecteur fonctionne et le résultat reste précis, mais il est temps de changer les piles.
2. Le symbole "🔋" apparaît avec **E-b**, **Error** et **Low** : Le courant n'est pas suffisant pour effectuer un test. Veuillez remplacer les piles immédiatement.

### Remplacement des piles (m)

**Assurez-vous que le lecteur est éteint pour remplacer les piles.**

1. Appuyez sur le bord du couvercle de la batterie et soulevez-le pour le retirer.
2. Retirez les anciennes piles et insérez deux nouvelles piles alcalines 1,5 V AAA.
3. Fermez le couvercle de la batterie. Si les piles sont correctement insérées, vous entendrez ensuite un « bip ».

#### NOTE

- Le remplacement des piles n'affecte pas les résultats des tests enregistrés dans la mémoire.
- Comme toutes les petites piles, ces piles doivent être tenues hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si les piles ont été avalées.
- Les batteries peuvent laisser échapper des produits chimiques si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période (c'est-à-dire 3 mois ou plus).
- Mettez les piles au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations locales.

## Prendre soin de votre appareil de mesure

### Nettoyage

- Pour nettoyer l'extérieur du lecteur, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'eau du robinet ou d'un détergent doux, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec.  
**NE PAS** rincer à l'eau.
- **N'utilisez PAS** de solvants organiques pour nettoyer le lecteur.

### Ranger le lecteur

- Conditions de stockage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F), moins de 95% d'humidité relative.
- Rangez ou transportez toujours le lecteur dans son étui d'origine.
- Ne laissez pas tomber le lecteur et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Évitez les rayons directs du soleil et une forte humidité.

### Mise au rebut du lecteur

Le lecteur usagé doit être traité comme un déchet contaminé qui peut présenter un risque d'infection pendant la mesure. Les piles de ce lecteur usagé doivent être retirées et le lecteur doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Le lecteur n'entre pas dans le cadre de la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## Prendre soin de vos bandelettes réactives

- Conditions de stockage : 2°C à 32°C (35,6°F à 89,6°F), moins de 85% d'humidité relative. **NE PAS** congeler.
- Conservez vos bandelettes réactives uniquement dans leur tube d'origine. Ne les transférez pas dans un autre support.
- Conservez les récipients contenant les bandelettes réactives dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Après avoir retiré une bandelette réactive du tube, refermez **immédiatement** et fermement le bouchon.
- Ne touchez la bande de test qu'avec des mains propres et sèches.

- Utilisez chaque bandelette réactive immédiatement après l'avoir retirée du tube.
- Inscrivez la date d'ouverture sur l'étiquette du tube lorsque vous l'ouvrez pour la première fois. Jetez les bandelettes réactives restantes après 3 mois.
- N'utilisez pas de bandelettes réactives après la date de péremption. Cela peut entraîner des résultats inexacts.
- Ne pas plier, couper ou modifier une bandelette réactive de quelque manière que ce soit.
- Gardez le tube de bandelettes réactives hors de portée des enfants, car le bouchon et la bandelette peuvent présenter un risque d'étouffement. Consultez immédiatement un médecin si une pièce a été avalée.

Pour plus d'informations, voir la notice dans l'emballage des bandelettes réactives.

## Informations importantes sur la solution de contrôle

- Utilisez uniquement nos solutions de contrôle avec votre lecteur.
- Ne pas utiliser la solution de contrôle après sa date de péremption ou 3 mois après la première ouverture. Inscrivez la date d'ouverture sur le flacon de la solution de contrôle et jetez la solution restante après 3 mois.
- Il est recommandé d'effectuer le test avec la solution de contrôle à température ambiante, entre 20°C et 25°C (68°F et 77°F). Assurez-vous que la solution de contrôle, le lecteur et les bandes réactives sont à cette température avant de procéder au test.
- Agitez le flacon avant utilisation, jetez la première goutte de solution de contrôle et essuyez l'embout du distributeur pour garantir un échantillon propre et un résultat précis.
- Conservez la solution de contrôle hermétiquement fermée à une température comprise entre 2°C et 30°C (35,6°F et 86°F). **NE PAS** congeler.

## RÉSoudre LES PROBLÈMES AVEC LE SYSTÈME

Si vous suivez l'action recommandée mais que le problème persiste, appelez votre service clientèle local.

### Lecture des résultats

MESSAGE	SIGNIFICATION
L <sub>0</sub> ou 1,6 mmol/L	≤ 1,6 mmol/L (29 mg/dL)
CÉTONES ?	≥ 13,3 mmol/L (240 mg/dL)
H <sub>1</sub>	> 33,3 mmol/L (600 mg/dL)

### Messages d'erreur

MESSAGE	SIGNIFICATION	QUOI FAIRE
E-b	Apparaît lorsque les piles sont faibles.	Remplacer les piles immédiatement.
E-U	Apparaît en cas d'insertion d'une bandelette usagée ou d'une utilisation incorrecte *	Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive.
E-t	Apparaît lorsque la température ambiante est supérieure ou inférieure à la plage de fonctionnement du système.	La plage de fonctionnement du système est de 10 °C à 40°C (50 F à 104 F). Répétez le test lorsque le lecteur et la bandelette réactive se trouvent dans la plage de température ci-dessus.
E-F	Apparaît lorsque la bandelette réactive est retirée pendant le compte à rebours ou en cas de volume sanguin insuffisant.	Lisez les instructions et répétez le test avec une nouvelle bandelette. Si le problème persiste, contactez votre service clientèle local pour obtenir de l'aide.
E-O, E-A, E-C, E-E	Problème avec le lecteur.	Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive. Si le lecteur ne fonctionne toujours pas, contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

\* Voir les instructions d'utilisation (vidéo) sur [ht-one.nl/support](http://ht-one.nl/support) ou lire la procédure

## Dépannage

1. Si le lecteur n'affiche pas de message après l'insertion d'une bandelette réactive :

CAUSE POSSIBLE	QUOI FAIRE
Les piles sont vides.	Remplacer les piles.
La bandelette réactive est à l'envers ou n'est pas complètement insérée.	Placez la bande avec l'extrémité comprenant les tiges de contact en premier et vers le haut.
Lecteur en panne ou bandelettes réactives défectueuses.	Prenez contact avec service client.

2. Si le test ne démarre pas après l'application de l'échantillon :

CAUSE POSSIBLE	QUOI FAIRE
Échantillon de sang insuffisant.	Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive contenant un plus grand volume d'échantillon sanguin.
Bandelette réactive défectueuse.	Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive.
L'échantillon est appliqué après l'arrêt automatique (5 minutes après la dernière action de l'utilisateur).	Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive. Ne pas appliquer l'échantillon jusqu'à ce que l'écran affiche "♦" en clignotant.
Lecteur défectueux.	Prenez contact avec service client.

3. Si le résultat du test avec la solution de contrôle est en dehors de la plage spécifiée :

CAUSE POSSIBLE	QUOI FAIRE
Erreur lors de l'exécution du test.	Lisez attentivement les instructions et répétez le test.
Le flacon de solution de contrôle n'a pas été correctement secoué.	Agitez bien la solution de contrôle et répétez le test.
Solution de contrôle périmée ou contaminée.	Vérifiez la date de péremption de la solution de contrôle.
La solution de contrôle est trop chaude ou trop froide.	La solution de contrôle, le lecteur et les bandelettes réactives doivent être à la température ambiante, de 20°C à 25°C (68°F à 77°F) avant le test.
Bandelette réactive défectueuse.	Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive.
Dysfonctionnement du lecteur	Prenez contact avec service client.
Le lecteur et la bandelette réactive ne fonctionnent pas correctement.	Prenez contact avec service client.

## INFORMATION DÉTAILLÉE












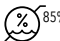
1. Le lecteur donne des résultats équivalents à ceux du plasma :

Heure de la journée	Plage de glycémie normale chez les <b>non-diabétiques</b> (mg/dL)
À jeun et avant le repas	< 5,6 mmol/L (100 mg/dL)
2 heures après les repas	< 7,8 mmol/L (140 mg/dL)

Source: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes- 2016;39 (suppl. 1 Diabetes Care): S16.

**Consultez votre médecin pour déterminer la fourchette cible qui vous convient le mieux.**

## INFORMATIONS SUR LES SYMBOLES

SYMBOLE	RENVOIE À	SYMBOLE	RENVOIE À
	appareil de diagnostic médical <i>in vitro</i>		Fabricant
	Consultez le mode d'emploi		Numéro de série
	Limite de température		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	À utiliser avant		Veuillez lire la documentation
	Code du lot		Élimination conformément à la réglementation
	Marquage CE		Limitation de l'humidité de l'air





 TaiDoc Technology Corporation  
Bi.7F, No.127, Wugong 2nd Rd.,  
Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan


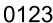


**EC REP** MedNet EC-REP GmbH  
BorkstraBe 10, 48163 Münster, Allemagne

Importation Europe: HT Medical BV

Distributeur: **GD Medical Pharma BV**  
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven  
info@gdmedicalpharma.nl

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HT Medical BV se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Pour les autotests

TD-4277B